

ט"ה - 09.01 : דיגום מטושים לבדיקת מיקופלסמה	מס' עדכון : 0	בתוקף מיום : 25/1/2016	עמוד 1 מתוך 1
---	---------------	------------------------	---------------

הנחיות לדיגום מטושים לבדיקת מיקופלסמה (MM או MS ,MG)

1. המדגם :
 - דיגום מטושים מעופות לבדיקת מיקופלסמה יתבצע ב - 20 עופות ממבנה.
 - הדיגום יתבצע מעופות חיים או מתים טריים.
2. יש לרשום את פרטי המשק על גבי השקית : שם המשק, מספר רישיון, שם הישוב ומספר הלול.
3. דיגום :
 - הנח את העוף על משטח, הוצא מטוש סטרילי מהמבחנה, החדר אותו לאורך קנה הנשימה לעומק של 1-2 ס"מ לפחות וסובב 2 עד 3 פעמים, החזר את המטוש למבחנה.
 - בעופות צעירים, קטנים יותר יש להשתמש במטושים דקים.
4. אין אפשרות לבדוק נוכחות נגיפים במטושים אלה. במידה ומעוניינים בבדיקת נוכחות נגיפים בשיטת ה- PCR או בשיטת הווירולוגיה יש לדגום מטושים נוספים בהתאם להוראות דיגום מטושים לוירולוגיה (ט"ה 07.01).
5. יש להעביר את המטושים למעבדה בטווח זמן של 24 שעות בצירוף טופס מסירת דוגמאות למעבדה בו מצוינת מטרת הבדיקה. את הדגימות עד הגעתן יש לשמור בקירור.
6. יש לתאם מראש את הבאת הבדיקות למעבדה. המעבדות לבריאות העוף מתחייבות לתת תשובה בטווח זמן של עד שני ימי עבודה.
 - אל תהססו לפנות אלינו בכל שאלה שהיא.

בהצלחה !

המעבדות לבריאות העוף

אזור צפון : טל : 04-6527598 , 04-6974178 ; פקס : 04-6528793 ; דוא"ל : Ofotz@epb.org.il
 אזור דרום : טל : 08-8503207 , 08-8584280 ; פקס : 08-8583277 ; דוא"ל : Ofotbt@epb.org.il